



Product Application / Service Sectors: Nasal Douche Medical Equipment / Nasal Irrigation



The Remedy Nasal Douche is an innovative therapy for intensive gentle cleansing of the nose and sinuses. This equipment is made from flexible polymer and has a maximum volume up to 250 ml. Thus, the material is durable and lightweight including its design of equipment is very functional, practical, and easy to use.

Remedy Healthcare Nasal Douche has a Thailand's patent no. 25274

ขวดล้างโพรงจมูกเรเมดี้เป็นอุปกรณ์บรรจุน้ำเกลือขณะสวนล้างโพรงจมูกและไซนัส โดยตัวอุปกรณ์ช่วยทำให้การล้างโพรงจมูกมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจากการออกแบบลักษณะของขวดล้างโพรงจมูกทำให้มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย ไม่น่ากลัว ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งสามารถใช้งานได้หลายครั้งไม่สิ้นเปลืองเพราะสามารถฆ่าเชื้อโดยการลวกน้ำร้อนได้สืบเนื่องจากการใช้วัสดุที่สามารถทนต่อความร้อนขณะฆ่าเชื้อ การล้างโพรงจมูกนั้นเป็นการบรรเทาอาการผู้ป่วยที่มีน้ำมูกอุดตันภายในโพรงจมูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ไซนัส ภูมิแพ้ หอบหืด เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ขวดล้างโพรงจมูกเรเมดี้ได้มีเลขที่สิทธิบัตร ๒๕๒๗๔.

## How to use the Nasal Douche Equipment:

1. Make sure that the valve is close when filling the nasal douche with the lukewarm saline solution.
2. Open the valve, then pushing the spout upward with the nozzle attached. While keep your finger over the hole in the top until you're ready to release the saline solution.
3. Attached the nozzle into the one nostril and open your mouth during your nasal irrigation. The saline solution will flow into one nostril and down out from the other.

## ขั้นตอนวิธีการใช้อุปกรณ์ขวดล้างโพรงจมูกเรเมดี้

1. เปิดฝาขวดล้าง และหมุนปิดวาล์วเพื่อเติมน้ำเกลือ Normal Saline Solution โดยปริมาณน้ำเกลือสุทธิที่เหมาะสมต่อการล้าง 1 ครั้ง คือ 250 ml (สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์และอาการของผู้ใช้ได้ การปรับเปลี่ยนปริมาณไม่ส่งผลข้างเคียงใดๆ)
2. หลังเติมน้ำเกลือแล้ว ปิดฝาขวดล้างโพรงจมูกจากนั้นนำนิ้วชี้อุดช่องอากาศบนฝาขวด และค่อยหมุนเปิดวาล์ว
3. นำขวดล้างโพรงจมูกจรดปลายรูจมูกฝั่งใดฝั่งหนึ่ง และยกนิ้วชี้ที่อุดรูอากาศออก น้ำเกลือจะไหลเข้าสู่โพรงจมูกทำการล้างน้ำมูก และสารคัดหลั่งต่างๆ ออก
4. เมื่อปริมาณน้ำเกลือต่ำลง ให้นำนิ้วชี้อุดรูอากาศ และบีบข้างขวดเล็กน้อยดันน้ำเกลือออก

## หมายเหตุ:

- ก่อน-หลังใช้ขวดล้างโพรงจมูก สามารถฆ่าเชื้อหรือทำความสะอาดได้ด้วยการลวกน้ำร้อน
- ขณะล้างออกเสียง -อา ป้องกันการสำลักน้ำเกลือได้

# HOW TO USE REMEDY NASAL DOUCHE?

## วิธีการใช้ขวดล้างโพรงจมูก

1



ก่อนใช้ ควรทำความสะอาดขวดล้างโพรงจมูกด้วยการลวกน้ำร้อนทุกครั้ง จากนั้นจึงเทน้ำเกลือผสมเสร็จ Saline Solution [กึ่งขีด MAX]

\*ระหว่างเทให้ปิดวาล์วตรงข้อต่อหัวล้าง

2



จากนั้นปิดฝาให้สนิท เอนหัวขึ้นอุดรูด้านบนบนฝาปิดไว้

3



เปิดวาล์วตรงข้อต่อได้ โดยนิ้วชี้ยังคงปิดอยู่ที่รูด้านบนบนฝา

4



จากนั้น สามารถใช้ล้างจมูกได้ตามปกติ โดยระหว่างการล้าง ควรออกเสียง “อา” ป้องกันการสำลัก

# HOW TO USE REMEDY NASAL DOUCHE?